

2.3 Hinweise zur Anwendung

Der Insektenstich/Juckreiz der Haut kann durch die Konzentration der Wärme auf die betroffene Stelle gelindert werden.

Der Wirkmechanismus der konzentrierten Wärmeanwendung (lokale Hyperthermie) beruht auf der kurzzeitigen, konzentrierten Einwirkung von Wärme auf eine sehr kleine Hautfläche.

3.0 Sicherheitshinweise



3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- 3.1.1 Der Patient ist der ordnungsgemäße Verwender des Insektenstichheilers.
- 3.1.2 Nicht zur Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren ohne Überwachung durch einen Erwachsenen.
- 3.1.3 Nicht zur Verwendung durch behinderte Menschen und Personen mit eingeschränkter Hitzeempfindlichkeit, wie z. B. Menschen mit krankheitsbedingten Hautveränderungen und Narben im Anwendungsgebiet.
- 3.1.4 Nicht anwenden bei Thromboembolien oder wiederkehrendem malignen Wachstum oder unerklärlichen chronischen Schmerzen in einem Teil des Körpers.
- 3.1.5 Nicht in der Nähe von Augen, Augenlidern, Mund oder Schleimhaut anwenden.
- 3.1.6 Stellen Sie sicher, dass Sie allgemeine Hygienevorschriften beachten, wenn Sie den Insektenstichheiler verwenden.
- 3.1.7 Suchen Sie ärztlichen Rat, wenn die Symptome des Bisses trotz Anwendung des Insektenstichheilers anhalten oder sich verschlechtern.
- 3.1.8 Suchen Sie sofort ärztlichen Rat, wenn der Biss ein Zeckenbiss ist, da er zur Übertragung von Krankheitserre-

gern führen kann (z.B. Frühsommermeningoenzephalitis oder Borreliose).

- 3.1.9 Suchen Sie medizinischen Rat wenn der Insektenstich Symptome wie zunehmenden Juckreiz und Hautrötung, Schwellung, Schwindel, Übelkeit, Kurzatmigkeit, Bildung von Quaddeln oder Abfall oder Anstieg des Blutdrucks verursacht.
- 3.2.0 Wenn Zweifel an Ihrer Eignung für die Verwendung des Insektenstichheilers bestehen, konsultieren Sie einen Arzt.
- 3.2.1 Stellen Sie sicher, dass Kinder das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
- 3.2.2 Halten Sie das Gerät von Kindern und Haustieren fern. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- 3.2.3 Beachten Sie bei der Benutzung des Gerätes die allgemeine Hygienepraxis.
- 3.2.4 Dieses Gerät ist kein Ersatz für medizinische Beratung und Behandlung. Also fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie irgendwelche Schmerzen oder Krankheiten haben.
- 3.2.5 Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, wenn Sie sich unwohl fühlen oder Schmerzen haben, stellen Sie die Anwendung bitte sofort ein.
- 3.2.6 Führen Sie keine Wartungs- und Servicetätigkeiten am Gerät durch, während es verwendet wird.
- 3.2.7 Nehmen Sie ohne Genehmigung des Herstellers keine Änderungen am Gerät vor. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- 3.2.8 Bei allergischen Reaktionen, beenden Sie die Behandlung bitte sofort und konsultieren Sie Ihren Arzt.

3.3 Gegenanzeigen



- 3.3.1 Nicht verwenden, wenn Sie an Diabetes leiden. Das Schmerzempfinden kann vermindert sein und Diabetiker könnten sich selbst Verbrennungen zufügen.
- 3.3.2 Nicht zur Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren.
- 3.3.3 Nicht anwenden auf entzündeter Haut, geröteter Haut, gereizter Haut, Hautausschlägen, Verbrennungen, Erfrierungen, Prellungen, Schwellungen, offenen oder heilenden Wunden, noch nicht verheilten oder frischen, postoperativen Narben.
- 3.3.4 Nicht verwenden, wenn Sie an Fieber leiden.
- 3.3.5 Verwenden Sie das Gerät nicht auf empfindlichen Hautbereichen.
- 3.3.6 Nicht verwenden, wenn Sie zum Zeitpunkt des Insektenbisses Lotionen, Cremes und Gele auf Ihrer Haut haben.
- 3.3.7 Nicht verwenden, wenn Ihr Schmerzempfinden reduziert ist (z.B. Stoffwechselstörungen).
- 3.3.8 Nicht verwenden, wenn Sie aufgrund der Langzeitanwendung auf derselben Hautstelle (z.B. an der Stelle des Insektenstichs) an anhaltend entzündeter Haut leiden.

3.4 Nebenwirkungen



- 3.4.1 Abhängig von der Empfindlichkeit kann die Behandlungstemperatur etwas unangenehm sein. Bei empfindlichen Personen kann es nach der Verwendung zu einer temporären Rötung der Haut kommen.
- 3.4.2 In seltenen Fällen kann es bei Nutzern mit empfindlicher Haut zu Hautirritationen kommen.
- 3.4.3 Wenn Sie denselben Bereich der Haut innerhalb kurzer Zeit mehr als ein Mal behandeln, kann es zu Hautverbrennungen kommen.