

# AUFMERKSAM LESEN BEVOR MAN DEN BALL BENUTZT!

## VORSICHTSMASSNAHMEN UND ANLEITUNGEN ZUM GEBRAUCH

Diese Beschreibung ist eine **unentbehrliche Anleitung**, für eine richtige und sichere Benützung des **Ledragomma Original Pezzi® Gymnastik Balls, HiFit, Eggball** und **SitSolution (Version: STANDARD oder MAXAFE)**, weil sie die **notwendigen Informationen** enthält, wenn das Produkt nach der Anleitung gebraucht wird, haben die Benutzer die **vollste Zufriedenheit** unter den bezüglichen **Regeln der Sicherheit** für die Personen, während der ganzen Lebensdauer des Produkts und/oder seine Teile.

### ! VORGESEHENEN GEBRAUCH - GRENZEN UND AUSSCHLÜSSE

1. Dieser Ball ist realisiert und hergestellt worden, um ihn auf verschiedenen Gebieten zu benutzen, wie bei Sport-Fitness-Gymnastik aber auch auf dem medizinischen, sowie auf dem erziehenden Gebiet. Er darf nicht für andere Zwecke verwendet werden, die nicht von **Ledragomma** bestimmt sind.
2. Dieser Ball kann bis zu 400 Kg. belastet werden.
3. **Er ist kein Spielzeug** und auf jedem Fall nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten: enthält kleine Teile. Erststückergefahr.
4. **Keine Übung mit Gewichtstangen, Lenkstangen oder andersartige Gewichte auf dem Ball ausführen.**

### INHALT DER VERPACKUNG

5. Die Verpackung enthält einen Ball und zwei weisse Stöpsels und ein Ventil.

### AUFPUMPEN

6. Um den Ball aufzupumpen, muss man die Luftmatratzenpumpen oder Kompressoren benutzen (das Ventil benutzt man nur wenn man die Fahrradpumpe nimmt). **Nicht mit dem Mund aufblasen.**

### FOLGENDE BEDINGUNGEN UND PROZEDUR FÜR DIE ERSTE BENUTZUNG

7. Für die erste Benutzung, folgende Angaben:
  - 7.1) am Anfang, den Ball langsam aufpumpen mit den Geräten, wie oben genannt, beim Aufpumpen legen Sie einige Pausen ein
  - 7.2) nicht das Maß von 90% beim Durchmesser überschreiten, der auf dem Ball markiert ist und/oder auf der Verpackung
  - 7.3) die Öffnung mit einem weissen Stöpsel, der in der Verpackung ist, schliessen (der zweite Stöpsel gilt als Reserve)
  - 7.4) warten Sie 24 Stunden bevor Sie ihn zum seinen Höchstdurchmesser aufpumpen und ihn benutzen

### ! ANLEITUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR FOLGENDES AUFPUMPEN

8. Für folgendes Aufpumpen darf man nie den Höchst vorgeschriebenen Durchmesser überschreiten. Wenn Sie das Aufpumpen mit einem Kompressor durchführen und in die Nähe des vorgeschriebenen Höchstdurchmessers kommen, müssen sie langsam vorgehen. Der Stöpsel kann leicht, mit einem Kaffeelöffel entfernt werden.

### ! VORSICHTSMASSNAHMEN VOR JEDEM ERSTEN GEBRAUCH

9. Man muss, vor jedem ersten Gebrauch, die Oberfläche des Balles kontrollieren und man soll sich nicht auf den Ball setzen, wenn dieser Schnitte, Abschürfungen, Löcher oder andersartige Beschädigungen aufweist. In diesen letzten Fällen wird die Sicherheit des Balles in Frage gestellt, da der Ball plötzlich zerreißen könnte und zu einem herunterfall der Person, die auf dem Ball sitzt, führen.
10. Man muß vor jedem Gebrauch den Ball mit feiner Seife und Wasser und die hartnäckigen Flecken mit verdünnten Alkohol, reinigen.

### ! TEMPERATUR EINHALTEN

11. Achtung: der Ball muss bei einer Raumtemperatur (ca. 18-20° C)

aufbewahrt werden. Wenn die Raumtemperatur zu niedrig ist, wird mit dem Aufpumpen gewartet bis die Raumtemperatur erreicht ist.

### **! AUF WELCHE OBERFLÄCHEN BENUTZEN**

- 12.** Der Ball wird auf weichen Flächen benutzt, nie den Ball benutzen, wenn spitze und schneidende Gegenstände vorhanden sind aber auch nie, wo Hitze ist, man darf auch den unbenützten Ball nicht den Sonnenstrahlen aussetzen.

### **! VORSICHTSMASSNAHMEN BEI REPARATUREN**

- 13.** Wenn Löcher oder Schnitte vorhanden sind, nicht versuchen diese zu reparieren, weil "Selbst-Reparaturen" entkräften die Vollständigkeit des Produkts mit schwierigen Risiken für die Sicherheit und für die Gesundheit des Benützers. Nur bei den Bällen **Ledragomma Original Pezzi® Maxafe (flexton silpower Material Pat. No. EP 1.409 088 B1 - Pat.No. US 7.144,354 B2)** können kleine Löcher und Schnitte bis 5 mm. Länge repariert werden, mit dem spezial Kit für Reparatur, "Fika-Kit".

### **RÜCKVERFOLGBARKEIT**

- 14.** An der Ware befindet sich eine Artikelnummer bestehend aus 6 Ziffern, mit denen das Herstellungsdatum (Monat und Jahr) angegeben wird. Wir bitten Sie, bei Reklamationen diesen Kodex angeben, er dient uns, um das Datum zu identifizieren und welcher Anteil des Materials verwendet wurde.

### **BESCHRÄNKTE VERANTWORTUNG**

- 15.** Ledragomma S.r.l. übernimmt keine eventuelle Verantwortung für Schäden an Personen, Tieren oder Sachen oder in der Umwelt durch eine Benützung nicht gemäß den Gebrauchsvorschriften und in der Instandhaltung, die alle in dieser Übunganleitung enthalten sind, die in jedem Produkt beiliegt.

### **BEMERKUNG**

- 16.** Farben und Dekorationen können je nach Fabrikation geändert werden.
- 17.** Übungen online: [www.ledragomma.com](http://www.ledragomma.com)

#### ***Hergestellt bei:***

Ledragomma Srl - Zona Industriale C.I.P.A.F. – 33010 Osoppo (Ud) – Italy  
Tel.+39 0432/986049 – Fax +39 0432/986255  
[info@ledragomma.com](mailto:info@ledragomma.com) – [www.ledragomma.com](http://www.ledragomma.com)

***Hergestellt nach der Bescheinigung eines Qualitäts-Systems unter der Norm ISO 9001-ISO 13485 "Medizinprodukte"***